

AQuify®

Benetzungstropfen für lang anhaltenden Komfort



DIESES MERKBLATT ENTHÄLT WICHTIGE GEBRAUCHS-UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

Benetzungstropfen für lang anhaltenden Komfort für Träger aller Kontaktlinsentypen.

AQuify kann auch von Nicht-Kontaktlinsträgern verwendet werden, die unter Trockenheitsgefühl, Fremdkörpergefühl und Ermüdungserscheinungen der Augen leiden, hervorgerufen durch Reizungen wie Staub, Rauch, trockene Luft, Aufenthalt in klimatisierten Räumen und ausgedehnte Bildschirmarbeit.

Die isotonische, wässrige Lösung enthält: Natrium Chloride, Natrium Hyaluronate 0,1%, Natrium Phosphate und Natrium Perborate 0,028% (Konservierungsmittel), stabilisiert mit Phosphonic Acid.



Hergestellt unter aseptischen Bedingungen

AQuify® enthält ein verschwindendes Konservierungsmittel. Kleine Mengen von Peroxide Konservierungsmittel schützen die Lösung in der Flasche und werden beim Kontakt am Auge in Wasser und Sauerstoff zerlegt. Spuren von Perborate und Borate sind ebenfalls vorhanden.



GEBRAUCHSHINWEISE

- Verwenden Sie **AQuify** Comfort Drops bei Bedarf
- Waschen Sie Ihre Hände.
- Um die Tropfen zu verwenden, träufeln Sie einen oder zwei Tropfen in jedes Auge (vermeiden Sie das Berühren des Auges mit der Tropferspitze) und führen Sie mehrere Lidschläge aus.
- Wenn Ihnen Ihr Kontaktlinsenanpasser Linsen angepasst hat, die über Nacht getragen werden können, verwenden Sie die **AQuify** Comfort Drops nach dem Aufwachen und vor dem Schlafengehen.
- Wenn Nicht-Kontaktlinsträger auch nach Beseitigung von möglichen Reizungsgründen noch Irritationen empfinden, sollten sie den Augenarzt aufsuchen, da dies eventuell medizinische Ursachen hat.


GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe nicht verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 
- Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt ist.
- Flasche nach Gebrauch verschließen.
- Geöffnete Flasche innerhalb von 8 Wochen aufbrauchen. Restliche Lösung weggießen.
- Berühren Sie mit der Tropferspitze keine Oberflächen, da dies die Lösung verunreinigen kann.
- Unter 25°C aufbewahren.  25°C
- Kontaktlinsträger: Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser, bevor sie Lösungen wechseln.

WARNHINWEISE

- **NIEMALS AQuify** verdünnen oder mit anderen Lösungen mixen. Dies zerstört die Wirksamkeit der Lösung.
- **Kontaktlinsenträger: NIEMALS Ihre Kontaktlinsen mit unsterilen Flüssigkeiten (einschließlich Leitungswasser und Speichel) in Kontakt bringen, da dadurch eine mikrobielle Verunreinigung erfolgen kann, welche zu dauerhaften Schädigungen der Augen führen könnte.**
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. 
- Kontaktlinsenträger: Bevor Sie ein Medikament mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser.



NEBENWIRKUNG


Sollten Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten (Kontaktlinsenträger: nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen ab), verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

PACKUNGSGRÖSSEN : 2 ml, 10 ml

Stand:10/2011

MAT Proof 6, 04-08-11

	Hersteller: CIBA VISION Corporation Duluth, Georgia 30097, USA	 0086
--	---	--

	EU Bevollmächtigter: CIBA VISION GmbH, 63868 Großwallstadt, Germany
---	--

Vertrieb:

CIBA VISION Vertriebs GmbH

63702 Aschaffenburg, Germany

Internet: www.cibavision.de


Gemeinsam für gesundes Sehen und mehr Lebensqualität