

SOLOCARE AQUA®

WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

SOLOCARE AQUA® ist eine Einflaschen Multifunktions-/ Desinfektionslösung zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Entfernen von Proteinen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen. Die isotonische, wässrige, antimikrobielle/antibakterielle* Lösung enthält: Polyhexanide 0,0001 % (aktiver Bestandteil und Konservierungsmittel), Hydrolock™ (Dexpanthenol und Sorbitol), Natrium Phosphate, Tromethamine, Poloxamer 407, Disodium Edetate.





Hergestellt unter aseptischen Bedingungen.

Der MicroBlock™ antibakterielle Linsenbehälter enthält Silber.

*Wirksam gegen Keime und Mikroorganismen, gelistet ISO 14729.

GEBRAUCHSHINWEISE

- 1. Waschen Sie bitte sorgfältig die Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch.**
- 2. Öffnen Sie den Linsenbehälter.**
- 3. Nehmen Sie die Kontaktlinse ab und legen Sie sie auf Ihre Handinnenfläche.**
- 4. Geben Sie auf jede Seite der Kontaktlinse mindestens 3 Tropfen SOLOCARE AQUA® (siehe Abbildung 1).**
- 5. Reiben Sie die Linse vorsichtig mit kreisenden Bewegungen mindestens 10 Sekunden lang.**
- 6. Spülen Sie die Linse gründlich mit SOLOCARE AQUA® ab und reiben Sie sie dabei mindestens 10 Sekunden lang vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger (siehe Abbildung 2).**

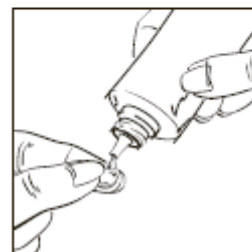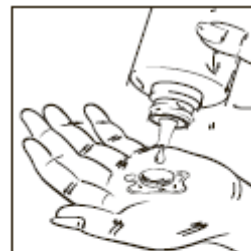


- 7. Legen Sie die Linse in den Linsenbehälter und füllen Sie eine Seite bis zur Fülllinie mit frischer SOLOCARE AQUA® Lösung.**
- 8. Schraubkappe aufsetzen und fest schließen.**
- 9. Wiederholen Sie die bisherigen Pflegeschritte mit der anderen Linse.**
- 10. LASSEN SIE IHRE LINSEN MINDESTENS 5 MINUTEN IN DER LÖSUNG.**
- 11. Ihre Linsen können jetzt direkt auf die Augen aufgesetzt werden.**
- 12. Schütten Sie die Lösung aus dem Linsenbehälter, spülen Sie diesen mit frischer SOLOCARE AQUA® Lösung ab und schließen Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch.**
- 13. Wenn die Linsen vor dem Tragen länger als 30 Tage in SOLOCARE AQUA® aufbewahrt wurden, müssen Sie die Lösung aus dem Linsenbehälter schütten, den**

manuellen Reinigungsprozess wiederholen und die Linsen mindestens 5 Minuten in SOLOCARE AQUA® desinfizieren, bevor Sie sie wieder tragen.


GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)

- Nicht verwenden, wenn Sie empfindlich auf einen der Inhaltsstoffe oder allergisch auf Silber oder andere Metalle reagieren.
- SOLOCARE AQUA® niemals zur thermischen Desinfektion verwenden.



VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 
- Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
- Flasche nach dem Gebrauch verschließen.
- GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 3 MONATEN AUFBRAUCHEN. RESTLICHE

LÖSUNG WEGGIESSEN. ^{3M}

- Niemals die Tropferspitze der Flasche mit Oberflächen in Berührung bringen, dies könnte die Lösung verunreinigen.
- Tauschen Sie den Kontaktlinsenbehälter mit jeder neuen Flasche SOLOCARE AQUA® aus.
- Unter 25°C aufbewahren.  ^{25°C}
- Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser, bevor Sie Lösungen wechseln.

WARNHINWEISE

- Verwenden Sie immer frische SOLOCARE AQUA® Lösung. Niemals Lösung in Ihrem Behälter ein zweites Mal verwenden, da diese nicht mehr wirksam ist.
- NIEMALS SOLOCARE AQUA® in ein anderes Behältnis umfüllen. 
- NIEMALS SOLOCARE AQUA® verdünnen oder mit irgendeiner Lösung mixen, dies würde die Wirksamkeit zerstören.
- BRINGEN SIE NIEMALS IHRE KONTAKTLINSEN MIT UNSTERILEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESSLICH LEITUNGSWASSER ODER SPEICHEL) IN VERBINDUNG, DA DADURCH EINE MIKROBIELLE VERUNREINIGUNG ERFOLGEN KANN, DIE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDIGUNGEN AN DEN AUGEN FÜHREN KÖNNTE.
- VERWENDEN SIE IMMER DIE BESTANDTEILE DES SOLOCARE AQUA® SYSTEMS, EINSCHLIESSLICH DES LINSENBEHÄLTERS.
- FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN. 
- Bevor Sie irgendwelche Medikamente mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser.


HINWEIS


Sollten länger andauernde Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

MicroBlock™ LINSENBEHÄLTER

Mit der Zeit kann es beim MicroBlock™ antibakteriellen Linsenbehälter zu leichten Farbveränderungen kommen. Dies beeinträchtigt nicht die antimikrobiellen Eigenschaften des Linsenbehälters.

SOLOCARE AQUA® ist erhältlich in 90 ml, 360 ml Flaschen, einschließlich Austauschbehälter

	Hersteller: CIBA VISION Corporation Duluth, Georgia 30097, USA	CE 0086
---	--	-------------------

	EU Bevollmächtigter: CIBA VISION GmbH, 63868 Grosswallstadt, Germany
---	---

Vertrieb:
CIBA VISION Vertriebs GmbH
63702 Aschaffenburg, Germany

Internet: www.cibavision.de

MAT: Prf 1, 16-12-09
Stand Oktober 2011

CIBA VISION™
Gemeinsam für gesundes Sehen und mehr Lebensqualität