
 NACHSTEHEND ERHALTEN SIE WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. UNZULÄNGLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

SoftWear® Saline Plus

BESCHREIBUNG

SoftWear® Saline Plus ist eine konservierungsmittelfreie, isotonische, wässrige Kochsalzlösung und enthält: Poloxamer 0.02%, Natrium Chloride, ein antimikrobielles Puffersystem A.B.S. ®), bestehend aus Boric Acid, Natrium Borate und Natrium Perborate (bildet bis zu 0.006% Hydrogen Peroxide, stabilisiert mit Phosphonic Acid). Das A.B.S. ® System schützt vor mikrobieller Verunreinigung.

 Hergestellt unter aseptischen Bedingungen.

SoftWear® Saline Plus kann mit allen Kontaktlinsentypen verwendet werden:

- zum Reinigen von Kontaktlinsen vor der Desinfektion
- zum Abspülen von Kontaktlinsen nach der Desinfektion
- zum Aufbewahren von Kontaktlinsen
- zum Auflösen von enzymatischen Proteinentfernungstabletten
- zum Abspülen des Kontaktlinsenbehälters
- zur thermischen Desinfektion weicher Kontaktlinsen

GEBRAUCHSHINWEISE

Befolgen Sie Gebrauchsinformationen Ihres Kontaktlinsenpflegesystems und die Empfehlungen Ihres Kontaktlinsenanpassers.

Reinigen der Kontaktlinsen mit **SoftWear® Saline Plus** VOR der Desinfektion

1. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.
2. Kontaktlinse vom Auge abnehmen und auf Ihre Handinnenfläche legen.
3. Geben Sie 2 Tropfen **SoftWear® Saline Plus** auf jede Seite der Kontaktlinse und reiben Sie behutsam, aber gründlich die Linse.
4. Gründlich mit **SoftWear® Saline Plus** abspülen.
5. Verwenden Sie zur DESINFEKTION Ihr gewohntes Pflegesystem.

Abspülen der Kontaktlinsen mit **SoftWear® Saline Plus** NACH der Desinfektion

1. Verwenden Sie zur DESINFEKTION der Linsen Ihr gewohntes Pflegesystem.
2. Waschen Sie Ihre Hände und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.
3. Spülen Sie die Linsen gründlich mit **SoftWear® Saline Plus** ab, bevor Sie sie direkt auf die Augen aufsetzen.

Kontaktlinsen können in **SoftWear® Saline Plus** aufbewahrt werden

- über Nacht vor der Desinfektion
- bis zu 30 Tage NACH der Desinfektion

Kontaktlinsen, die länger als 30 Tage aufbewahrt wurden, müssen vor dem Tragen erneut desinfiziert werden.




Zum Auflösen von enzymatischen Proteinentfernungstabletten / zum Abspülen des Linsenbehälters / zur thermischen Desinfektion mit **SoftWear® Saline Plus**:

Folgen Sie den entsprechenden Gebrauchshinweisen Ihrer enzymatischen Proteinentferntabletten / des Kontaktlinsenbehälters/ des Gerätes zur thermischen Desinfektion.



GEGENANZEIGEN (Gründe zur Nichtverwendung)

- Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe nicht verwenden.
- Verwenden Sie **SoftWear® Saline Plus** nicht mit chlorhaltigen Desinfektionstabletten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 
- Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.
- Flasche nach Gebrauch verschließen.
- **GEÖFFNETE FLASCHE INNERHALB VON 3 MONATEN AUFBRAUCHEN.**
- **RESTLICHE LÖSUNG WEGGIESSEN.** 
- Tropfer der Flasche nicht mit Oberflächen in Berührung bringen, dies kann die Lösung verunreinigen.
- Unter 30 ° C aufbewahren.  30°C
- Bevor Sie Lösungen wechseln, lassen Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenanpasser beraten.

WARNHINWEISE

- **IMMER** frische **SoftWear® Saline Plus** verwenden- niemals die gebrauchte Lösung in Ihrem Behälter ein zweites Mal verwenden, da diese nicht mehr wirksam ist.
- **NIEMALS** **SoftWear® Saline Plus** in ein anderes Behältnis umfüllen. 
- **NIEMALS** **SoftWear® Saline Plus** verdünnen oder mit irgendeiner Lösung mixen, dies würde die Wirksamkeit zerstören.
- **BRINGEN SIE NIEMALS IHRE KONTAKTLINSEN MIT UNSTERILEN FLÜSSIGKEITEN (EINSCHLIESSLICH LEITUNGSWASSER UND SPEICHEL) IN VERBINDUNG, DA DADURCH EINE MIKROBIELLE VERUNREINIGUNG ERFOLGEN KANN, WELCHE ZU DAUERHAFTEN SCHÄDIGUNGEN AN DEN AUGEN FÜHREN KÖNNTE.**
- **SoftWear® Saline Plus** allein ist nicht ausreichend für die Desinfektion der Kontaktlinsen.
- **FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.** 
- Bevor Sie ein Medikament mit Ihren Kontaktlinsen verwenden, besprechen Sie dies mit Ihrem Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser.

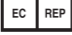
HINWEIS

Sollten andauernde Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

PACKUNGSGRÖSSE

SoftWear® Saline Plus ist erhältlich in 360 ml Flaschen

 <p>Hersteller: CIBA VISION Corporation Duluth, Georgia 30097, USA</p>	<p>CE 0086</p>
--	---------------------------

 <p>EU Bevollmächtigter: CIBA VISION GmbH, 63868 Grosswallstadt, Germany</p>
--

Vertrieb:
CIBA VISION Vertriebs GmbH
63702 Aschaffenburg, Germany
Internet: www.cibavision.de

Stand: Oktober 2011
Proof 4, 06-11-09

