

Unizyme

Proteinentfernungstabletten



DIESES FALTBLATT ENTHÄLT WICHTIGE GEBRAUCHS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND AUFBEWAHREN. UNZULÄSSLICHE KONTAKTLINSENPFLEGE KANN ZU SCHWERWIEGENDEN SCHÄDIGUNGEN DER AUGEN FÜHREN.

BESCHREIBUNG

UNIZYME-Tabletten sind einfach anzuwenden zur enzymatischen Reinigung bei allen Typen von Kontaktlinsen. Die enzymatische Reinigung ist ein wichtiger Teil der Kontaktlinsenpflege, denn sie löst Proteine und andere Ablagerungen auf und entfernt sie von Ihren Kontaktlinsen. Generell sollten Kontaktlinsen mindestens einmal pro Woche enzymatisch gereinigt werden. Ihr Kontaktlinsenanpasser empfiehlt die für Sie richtigen Pflegezyklen.

Jede Tablette enthält: Subtilisin A 0,8 mg, Potassium Carbonate, Cidric Acid, Sodium Benzoate und Polyethylene Glycol.

GEBRAUCHSHINWEISE

- Hände waschen und mit sauberem Handtuch abtrocknen.
- Beginnen Sie immer mit der selben Kontaktlinse, um Verwechslungen zu vermeiden.

Stufe 1

Kontaktlinsen-Behälter mit 1 Kammer

- Behälter bis zur Füllmarkierung mit Desinfektionslösung oder steriler Kochsalzlösung füllen.
- Eine ganze Unizyme-Tablette in den Behälter hinzugeben (halbieren Sie die Tablette nicht). Die Lösung sprudelt, während sich die Tablette auflöst.



Kontaktlinsen-Behälter mit 2 Kammern

- Füllen Sie beide Kammern des Behälters mit Desinfektionslösung oder steriler Kochsalzlösung.
- Halbieren Sie eine Unizyme-Tablette an der Bruchstelle und geben Sie eine halbe Tablette in jede Kammer. Die Lösung sprudelt, während sich die Tablette auflöst.



Stufe 2

- Für die weiteren Pflegeschritte folgen Sie den Gebrauchshinweisen Ihres Desinfektionssystems.
- Legen Sie Ihre Linsen in die Linsenhalterungen oder in den Kontaktlinsenbehälter.
- Lassen Sie die Linsen mindestens 10 Minuten in der Desinfektionslösung. Die besten Ergebnisse werden bei einer Einwirkzeit über Nacht erzielt.
- Schütten Sie die gebrauchte Lösung aus dem Behälter.
- Wenn Sie eine sterile Kochsalzlösung verwenden, lassen Sie die Linsen mindestens 10 Minuten in der Lösung. Die besten Ergebnisse werden bei einer Einwirkzeit über Nacht erzielt. Vergessen Sie nicht, danach Ihre Linsen zu desinfizieren.



Stufe 3

- Spülen Sie die Linse vor dem Aufsetzen gründlich mit einer Abspüllösung oder einer sterilen Kochsalzlösung ab und reiben Sie sie dabei vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger, um gelöste Ablagerungen zu entfernen.




GEGENANZEIGEN

Bei Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe nicht verwenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Kontaktlinsen nicht länger als **12 Stunden** in der Unizyme-Lösung belassen.
- Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden. 
- Nur aus unbeschädigter Folienverpackung verwenden.
- Tabletten erst zum Gebrauch aus der Packung nehmen.
- Verwenden Sie keine Tabletten, die eine ungewöhnliche Farbe oder Aussehen haben bzw. aufgeweicht oder klebrig sind.
- Unter 30 °C aufbewahren.  30°C
- Bevor Sie Produkte wechseln, lassen Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenanpasser beraten.

WARNHINWEISE

- Lösung mit Unizyme darf nicht direkt ans Auge kommen. Falls dies versehentlich passiert, entfernen Sie Ihre Linsen und spülen Sie das geöffnete Auge mit reichlich sterilem Wasser oder Kochsalzlösung. 
- Verwenden Sie immer frische Lösung – **niemals gebrauchte Lösung** in Ihrem Kontaktlinsenbehälter ein zweites Mal verwenden.
- **Bringen Sie NIEMALS Ihre Kontaktlinsen mit unsterilem Wasser (einschließlich Leitungswasser) in Verbindung, da dadurch eine mikrobielle Verunreinigung erfolgen kann, welche zu dauerhaften Schädigungen der Augen führen könnte.**
- **FÜR KINDER UNZUGÄNGLICH AUFBEWAHREN.** 
- Unizyme-Tabletten nicht einnehmen (es sind keine Schädigungen zu erwarten, es sei denn, es wurden größere Mengen eingenommen. In diesem Fall können Magenbeschwerden auftreten). 
- Fragen Sie Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenanpasser, bevor Sie irgendwelche Medikamente mit Ihren Kontaktlinsen verwenden.

HINWEIS


Sollten Unverträglichkeiten oder Reizungen auftreten, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie Ihren Kontaktlinsenanpasser auf.

Packungsgröße: 12 Tabletten

Stand: Oktober 2011

Proof 2, 21-02-06

	Hersteller: CIBA VISION Corporation Duluth, Georgia 30097, USA	 0086
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

	EU Bevollmächtigter: CIBA VISION GmbH, 63868 Grosswallstadt, Germany
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Vertrieb:
CIBA VISION Vertriebs GmbH
63702 Aschaffenburg, Germany
Internet: www.cibavision.de

